

# Sedia da Trasporto

Sedia pieghevole da accompagnatore, in alluminio con due ruote anteriori e due posteriori con freni di stazionamento.

Disponibile con seduta di colore nero, pedane poggiatepiedi ribaltabili, braccioli fissi ma ribaltabili ed una cintura pelvica di sicurezza al bacino. Utile per brevi tragitti, in interno od esterno, si può facilmente richiudere su se stessa e trasportare grazie alla maniglia posta sul sedile, o al pratico borsone con maniglia che può contenerla.



## PULIZIA E MANUTENZIONE

Pulire tutti i particolari in nylon con acqua e sapone; se logori sostituirli immediatamente, potrebbero non sostenere più il peso della persona. Per la pulizia delle parti metalliche utilizzare un panno umido privo di detersivi corrosivi.

Asciugate subito la sedia se esposta all'acqua, mantenetela sempre pulita, specialmente se è stata a contatto con sabbia e acqua di mare. Controllate periodicamente il serraggio di tutti i dadi e viti che con l'uso continuo possono allentarsi.

Lubrificare le ruote secondo necessità con del grasso meccanico.

## SPECIFICHE TECNICHE

### Specifiche

Dimensioni

Dimensioni della seduta

Dimensioni ripiegata

Peso

Portata

### Valore

larghezza max. cm 63 altezza cm 90 profondità cm 75

larghezza cm 40 profondità cm 37

larghezza cm 63 profondità cm 45

kg. 8,3

max Kg. 100

## AVVERTENZE

- Utilizzate il modello più adatto alle vostre esigenze.
- Fate attenzione alle superfici bagnate e non usare come sedia in automobile.
- In caso di sosta prolungata, azionate i freni di stazionamento.
- La pendenza massima sostenibile per evitare il ribaltamento è del 6%.
- Non sostare a lungo ai raggi solari, le parti metalliche potrebbero arroventarsi procurando delle ustioni.

DURATA	COSTO	SPESE
15 gg	€ 35	€ 12
30 gg	€ 65	€ 12