




MONTASCALE EASYSSTEP

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO



VISTA GRAFICA

1. Pannello di controllo
2. Barra di sollevamento
3. Blocco regolabile dello schienale della sedia a rotelle
1. Impugnatura posteriore
2. Struttura a cingoli
3. Componenti di carico regolabili delle ruote
4. Ruota posteriore con freno
5. Vite di bloccaggio del piano
6. Ruote universali
7. Piattaforma di carico per merci
8. Motore
9. Cintura di sicurezza per sedia a rotelle o merci
10. Centralina di controllo
11. Batteria al litio

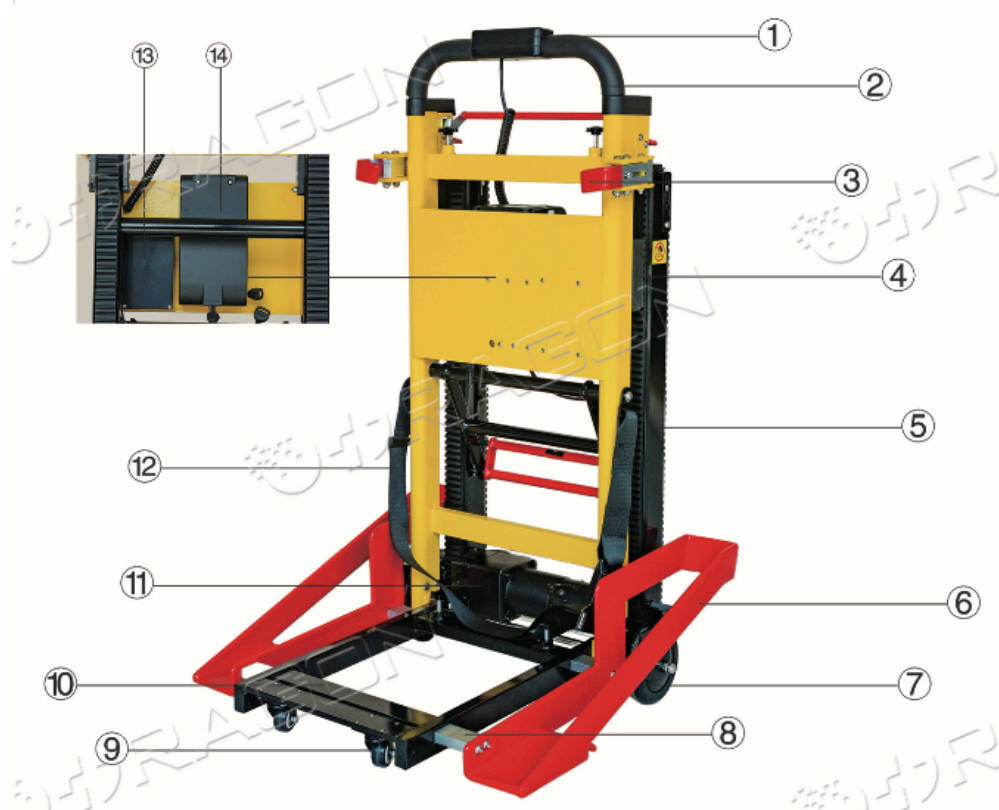



Voce	Specifiche
Modello	DW-11C
Dimensioni prodotto (L×P×H)	77 × 70 × 160 cm
Dimensioni da chiuso (L×P×H)	122 × 51 × 16,5 cm
Dimensioni imballo (L×P×H)	130 × 56 × 18 cm
Carico massimo	200 kg
Peso netto (N.W.)	24 kg
Peso lordo (G.W.)	40 kg
Potenza motore	120 W
Tensione di uscita motore	20-29,4 V
Tensione di alimentazione	110-240 V
Corrente motore	13,9 A
Tensione batteria	24 V
Durata di servizio	3-5 anni
Angolo del cingolo	Regolabile in 3 posizioni, adatto a diverse superfici

Caratteristiche tecniche del montascale a poltrona

1. Principalmente per ospedali, centri di emergenza, vigili del fuoco, ambulanze di emergenza e connessione familiare con le sedie a rotelle.
2. L'uso principale nei grattacieli: trasferimento dei pazienti su e giù per le scale, uso consentito solo a una persona alla volta.
3. Una struttura di binario unica, comoda e sicura quando il montascale a poltrona scende le scale.
4. I materiali del montascale a poltrona sono realizzati in lega di alluminio ad alta resistenza.

Preparazione del veicolo saliscale per l'uso

Controllo della carica della batteria

1. Sia quando la batteria è installata sul veicolo saliscale, sia quando è stata rimossa, ruotare completamente la chiave della batteria in senso orario.



2. Premere il pulsante rosso: le spie verdi si illumineranno se la batteria è carica.

- 1 spia = 30% di carica
- 2 spie = 50% di carica
- 3 spie = 100% di carica
- 4 spie = carica inferiore al 10%



Ricarica della batteria: sul veicolo montascale


3. Svitare in senso antiorario il cavo di collegamento della batteria.



4. Collegare il cavo del caricabatterie e ricaricare la batteria.



5. Quando la batteria è completamente carica, scollegare il cavo di ricarica, ricollegare il cavo di collegamento e avvitarlo in senso orario stringendo a mano.

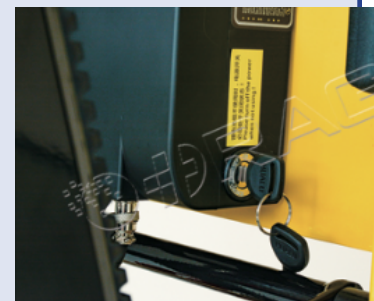

6. Abbassare la maniglia anteriore della batteria. Ruotare completamente la chiave in senso orario e tirare delicatamente la batteria in avanti per rimuoverla.



7. Collegare il cavo del caricabatterie e ricaricare la batteria. Quando la batteria è completamente carica, scollegare il cavo di ricarica, ricollegare il cavo di collegamento e avvitare in senso orario stringendo a mano.



Estensione della maniglia di comando

9. Rimuovere il veicolo saliscale elettrico dalla sua posizione di stoccaggio e slacciare la cinghia mantenendo il veicolo saliscale in posizione chiusa (piegata).



Dispiegamento del veicolo saliscale

8. Rimuovere il veicolo saliscale elettrico dalla sua posizione di stoccaggio e slacciare la cinghia mantenendo il veicolo saliscale in posizione chiusa (piegata).



Estensione dei cingoli


10. Spingere in avanti la barra inferiore con la freccia rossa, nella direzione indicata dalla freccia. Questa operazione sbloccherà il meccanismo di bloccaggio dei cingoli.



11. Tirare indietro la barra superiore dei cingoli fino a quando i cingoli si innestano nella seconda posizione di bloccaggio.



Scorrimento regolabile

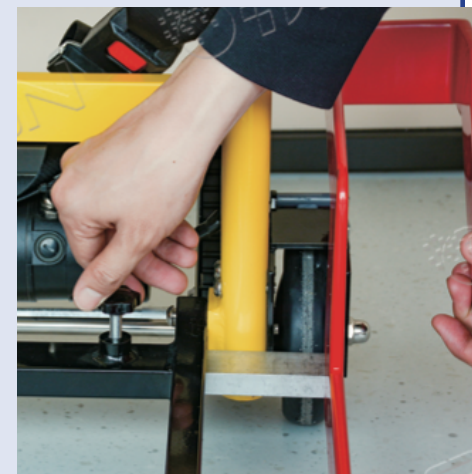

Applicazione dei freni

12. Premere con decisione il pedale/alette rosse del meccanismo di frenata con il piede per inserire il freno.



14. One finger of one hand grips the buckle to pull outward. Another hand to pull the top slide outward or push inward to fit for the size of wheelchair.



15. Regolazione del fermo di bloccaggio.

Regolare il fermo di bloccaggio in base alle dimensioni della sedia a rotelle. Il fermo di bloccaggio può essere spostato a destra e a sinistra.



16. Regolazione del fermo di

bloccaggio. Regolare il fermo di bloccaggio in modo da afferrare correttamente il veicolo saliscale.



Comandi del motore

17. Ruotare completamente la chiave in senso orario per accendere. Una spia rossa si accenderà sulla parte anteriore della batteria.



18. Accendere i pulsanti di controllo azionando

l'interruttore rosso: a. | = Acceso


b. O = Spento

Premere il pulsante giallo per far muovere il veicolo saliscale in avanti.

Premere il pulsante verde per far muovere il veicolo saliscale indietro.




Uso con assistenza aggiuntiva

Si consiglia che siano presenti almeno due operatori quando il veicolo saliscale viene utilizzato per evacuare persone con un peso superiore a 100 kg.

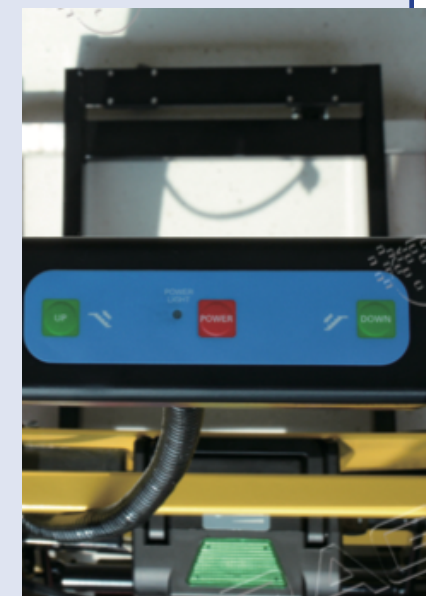

PULIZIA

Pulire il montascale per sedie a rotelle e le sue parti con un panno pulito o una spazzola morbida e acqua tiepida saponata. Sciacquare con acqua tiepida e lasciare asciugare all'aria. Non pulire con prodotti contenenti candeggina o fenolo. Se necessario, può essere utilizzata una spazzola a setole rigide.

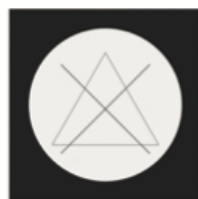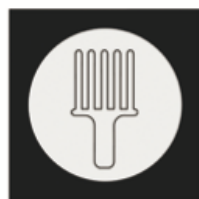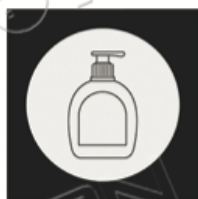

1

Non lasciare mai un evacuato incustodito sul montascale per sedie a rotelle e utilizzare sempre le cinture di sicurezza.

2

Evitare di cambiare rapidamente la posizione del montascale, poiché ciò potrebbe causare lesioni all'evacuato. Sostenere il montascale mentre si regolano le maniglie.

3

Una manutenzione impropria può causare lesioni. Effettuare la manutenzione del montascale per sedie a rotelle solo per gli scopi descritti in questo manuale.